

طقم جمع عينات البول Aptima® دليل إجراءات جمع عينات المريضات لعينات بول الإناث

يجب ألا تتبول المريضة لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل جمع العينة.

اغسلي يديك بالماء والصابون.



انزعبي غطاء جمع البول وضعي الغطاء رأسًا على عقب على طاولة.
لا تلمسي داخل الكوب بأصابعك.



لا تنظفي فتحة البول بمسحة تنظيف.



ابدئي التبول في كوب الجمع.
توقفي عندما يمتلئ كوب جمع البول بمقدار 20 إلى 30 مل تقريبًا.
لا تفرطي في ملء الكوب.
اكملتي التبول في المرحاض.



أعيدي تثبيت الغطاء بإحكام وتجنبي لمس داخل كوب الجمع.
ضعي الكوب في منطقة مخصصة أو أعطيه إلى أحد أفراد الطاقم الطبي.



طقم جمع عينات البول Aptima® دليل إجراءات جمع عينات المرضى لعينات بول الذكور

يجب ألا يتبول المريض لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل جمع العينة.

اغسل يديك بالماء والصابون.



انزع غطاء جمع البول وضع الغطاء رأسًا على عقب على طاولة.
لا تلمس داخل الكوب بأصابعك.



لا تنظف فتحة القضيب بمسحة تنظيف.



ابدء التبول في كوب الجمع.
توقف عندما يمتلئ كوب جمع البول بمقدار 20 إلى 30 مل تقريبًا.
لا تفرط في ملء الكوب.
اكمل التبول في المرحاض.



أعيد تثبيت الغطاء بإحكام وتجنب لمس داخل كوب الجمع.
ضع الكوب في منطقة مخصصة أو أعطيه إلى أحد أفراد الطاقم الطبي.



تقدم Hologic دليل إجراءات الجمع هذا كأداة إعلامية عامة فقط؛ فهو ليس تعليمات مؤكدة أو ضمانًا للأداء. يتحمل الطبيب/المختبر وحده مسؤولية قراءة وفهم النشرة الداخلية المناسبة والالتزام بالقواعد واللوائح المحلية والخاصة بالولاية والفيدرالية المعمول بها.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747